

# АКВА® МАРІС

## Склад:

морська сіль Адріатичного моря.

Нормальне дихання залежить від стану слизової оболонки носа. Застуда, алергічні реакції, запалення носових пазух, перебування в кімнаті з кондиціонером або центральним опалюванням, а також ряд інших ситуацій можуть посилити носову секрецію і привести до набряклості або навпаки, до сухості слизової оболонки носа. У подібних випадках нормально дихати неможливо. Утруднене дихання - це проблема, яка зустрічається як серед дітей, так і серед дорослих, вона заважає нашій повсякденній діяльності.

І саме море, і унікальне Адріатичне узбережжя, мають позитивну дію на дихальну систему. Застосовуючи цей продукт, який приготовлений на основі морської води, можливо досягти того ж природного ефекту, який з'являється, якщо жити біля моря протягом цілого року.

Люди, які живуть поруч з морем, зазвичай промивають ніс морською водою.

## Призначення:

Система для промивання носу Аква Маріс® призначена для дорослих та дітей віком від 5 років (за допомогою дорослого) для щоденної гігієни і для очищення носових ходів у спортсменів і людей, які віддають перевагу активному відпочинку, для тих, хто страждає на нежить і для людей із сухою слизовою оболонкою носа.

UA

## Морська сіль

Вміст у приготовленому розчині морської солі і води мінеральних солей та великого числа мікроелементів, благотворно впливає на слизову оболонку носа. Форма системи для промивання дає просте, зручне та ефективне промивання носової порожнини.

## Спосіб застосування:

- Морську сіль Аква Маріс® потрібно пересипати з пакета-саше в ємність для промивання.
- Заповнити ємність водою температури тіла до мітки (рисочки, що відповідає об'єму 330 мл), змішати сіль і воду і промивати ніс.

Промивати ніс потрібно, як описано далі.

- Нахилитися вперед, голову нахилити в бік. Притиснути підборіддя до грудної клітки.



- Прикласти кінчик ємності до ніздрі таким чином, щоб він був щільно притиснутий до неї. Вдихнути через рот та затримайте дихання.



- Почати процес промивання. Розчин буде витікати з іншої ніздрі.



Прочистити ніс у трьох положеннях:  
- Нахилить голову вперед і убік. Притиснути ту ніздрю, яка буде нижчою, і обережно висморкатися через ніздрю, яка буде знаходитися вище.



- Обличчям вниз, голова повинна бути в горизонтальному положенні. Висморкувати через ту ж ніздрю.



- Встати прямо і висморкатися через ніздрю в прямому положенні.



- Повторити процедуру з іншою ніздрею.

Після використання промити ємність для приготування розчину прохолодною водою і добре її висушити. (Не мити ємність в посудомийній машині).  
Неправильне положення тіла, голови чи ємності для промивання може перешкодити течії розчину або призвести до того, що розчин потече в рот або в горло. У подібних випадках у відповідності з інструкціями встати прямо і продовжувати промивання.

**Термін придатності:** 3 роки.

**Форма випуску:**

30 пакетів-саше (1 пакет-саше містить 2,97 г морської солі Адріатичного моря).

30 пакетів-саше з системою для промивання носу (1 пакет-саше містить 2,97 г морської солі Адріатичного моря з системою для промивання носа).

**Умови зберігання.**

Зберігати у сухому та у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

**Виробник:** «Ядран» Галенська Лабораторія д.д.,

Хорватія, 51000, Пулац б/н, Рієка.

тел. +385 51 546 376

Висновок державної сан.- епід. експертизи

№05.03.02-03/48236 від 14.07.2010 р.

Висновок державної сан.- епід. експертизи

№05.03.02-03/79897 від 02.08.2011 р.

